




















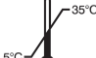


INSTRUKCJA UŻYWANIA ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ

MERCATOR simple vinyl

Poniższej instrukcji należy używać w powiązaniu ze szczegółowymi informacjami umieszczonymi na opakowaniu.

Opis produktu Rękawice ochronne (do minimalnego ryzyka), winylowe, bezpudrowe lub pudrowane, do jednorazowego użycia, niesterylne. Kolor : czarny / niebieski / transparentny Rozmiary : XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10) Ilość w opakowaniu jednostkowym : 100 sztuk wg wagi Okres ważności : 3 lub 5 lat w zależności od numeru partii (patrz na opakowaniu)	Wskazania dotyczące użytkowania Przed pobraniem rękawic z opakowania, zalecane jest dokładne osuszenie skóry rąk. Przed użyciem sprawdzić, czy rękawice nie zawierają defektów lub niedoskonałości oraz czy rękawice nie są uszkodzone. W trakcie użytkowania, w przypadku przekucia, pęknięcia lub rozdarcia należy natychmiast zmienić rękawice. Unikać rękawic zabrudzonych od wewnątrz – mogą one wywoływać podrażnienia prowadzące do zapalenia skóry lub poważniejszych obrażeń. Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, gdyż warunki w miejscu pracy mogą się różnić od warunków testu w zależności od temperatury, ścierania i degradacji. Rękawic nie należy używać w kontakcie z otwartym ogniem oraz do ochrony przed wszelkimi ostrymi narzędziami. Rękawice nie są przeznaczone do spawania, do ochrony przed porażeniem elektrycznym, promieniowaniem jonizującym, ani przed działaniem zimnych i gorących przedmiotów.
Wskazania dotyczące przechowywania Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, źródeł ozonu i otwartego ognia. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze 5-35°C. Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie rozpuszczalników, olejów, paliw, smarów.	Składniki/składniki niebezpieczne Komponenty użyte w produkcji rękawic mogą powodować reakcje alergiczne. Niektóre rękawice mogą zawierać składniki będące przyczyną wystąpienia alergii u osób na nie uczulonych, u których mogą powstawać kontaktowe podrażnienia i/lub reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej skonsultuj się z lekarzem.
Kontakt z żywnością Rękawice oznakowane piktogramem oznaczającym dopuszczenie do kontaktu z żywnością  , zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 10/2011, Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 oraz z Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 o Dobrej Praktyce Produkcyjnej. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Badanie Migracji Globalnej zgodnie z normą EN 1186.	Utylizacja Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przewidziane zastosowanie Rękawice ochronne, winylowe, do jednorazowego użycia, niesterylne. Zaklasyfikowane jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii I, do minimalnego ryzyka. Rękawice przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami minimalnymi, tj. dłuższego kontaktu z wodą. Ich projekt i oznakowanie odpowiada wymaganiom Rozporządzenia 2016/425 o Środkach Ochrony Indywidualnej. Rękawice powinny być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.	
Producent MERCATOR MEDICAL S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków, Polska	Deklaracja zgodności i niniejsza instrukcja dostępne na stronie internetowej: https://mercatormedical.eu

Symbole użyte na opakowaniu

	producent		data ważności		jakości produktu nie gwarantuje się w przypadku uszkodzenia opakowania		rękawice winylowe
	kod partii		data produkcji		opakowanie do recyklingu		rękawice bezpudrowe (w zależności od rodzaju)
	numer katalogowy		chronić przed ozonem		opakowanie można traktować jako odpad komunalny		rękawice pudrowane (w zależności od rodzaju)
	zgodność z wymaganiami rynku ukraińskiego		chronić przed wilgocią		rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością		do jednorazowego użycia
	numer modelu		chronić przed światłem słonecznym		limit temperatury		produkt niejałowy
							zapoznaj się z IFU

MERCATOR simple vinyl MODEL #0010

REF NO: RP21015001-05_0010; RP20016001-05_0010; RP20017001-05_0010

ŚOI klasyfikacja i zgodność z normami

Rękawice zaklasyfikowane jako Środek Ochrony Indywidualnej – kategoria I, do minimalnego ryzyka zgodnie z Rozporządzeniem 2016/425 (Załącznik I).

Zgodność z normami: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-2:2019.



MERCATOR simple vinyl MODEL #1537

REF NO: RP21015001-05_1537; RP20016001-05_1537; RP20017001-05_1537; RP20018001-05_1537

ŚOI klasyfikacja i zgodność z normami

Rękawice zaklasyfikowane jako Środek Ochrony Indywidualnej – kategoria I, do minimalnego ryzyka zgodnie z Rozporządzeniem 2016/425 (Załącznik I).

Zgodność z normami: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-2:2019.



MERCATOR simple vinyl MODEL #1056

REF NO: RP20016001-05_1056; RP20017001-05_1056


ŚOI klasyfikacja i zgodność z normami

Rękawice zaklasyfikowane jako Środek Ochrony Indywidualnej – kategoria I, do minimalnego ryzyka zgodnie z Rozporządzeniem 2016/425 (Załącznik I).

Zgodność z normami: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-2:2019.



Jak zakładać rękawice?

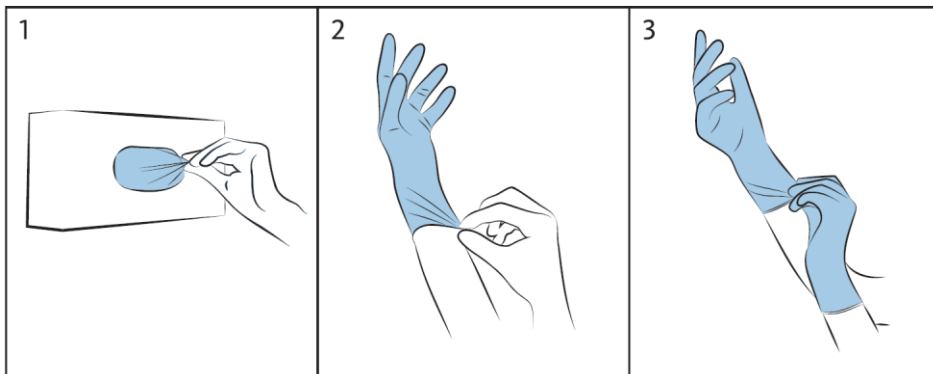

Jak zdejmować rękawice?

