


## INSTRUKCJA UŻYWANIA ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### MERCATOR simple nitrile

Poniższej instrukcji należy używać w powiązaniu ze szczegółowymi informacjami umieszczonymi na opakowaniu.

Opis produktu	
Rękawice ochronne (do minimalnego ryzyka), nitylowe, bezpudrowe, do jednorazowego użycia, niesterylne.	
Kolor	: niebieskie
Rozmiary	: XS, S, M, L, XL
Ilość w opakowaniu jednostkowym	: 10 x 100 para
Okres ważności	: 3 lata od daty produkcji

Wskazania dotyczące przechowywania	
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego, źródeł ozonu i otwartego ognia. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze 5-35°C. Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie rozpuszczalników, olejów, paliw, smarów.	

Kontakt z żywnością	
Rękawice oznakowane piktogramem oznaczającym dopuszczenie do kontaktu z żywnością  , zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 10/2011, Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 oraz z Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 o Dobrej Praktyce Produkcyjnej. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Badanie Migracji Globalnej zgodnie z normą EN 1186.	

















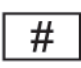

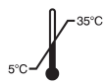

Przewidziane zastosowanie	
Rękawice ochronne, nitylowe, bezpudrowe, do jednorazowego użycia, niesterylne. Zaklasyfikowane jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii I, do minimalnego ryzyka. Rękawice przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami minimalnymi, tj. dłuższego kontaktu z wodą. Ich projekt i oznakowanie odpowiada wymaganiom Rozporządzenia 2016/425 o Środkach Ochrony Indywidualnej. Rękawice powinny być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.	

Producent	
MERCATOR MEDICAL S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków, Polska	Deklaracja zgodności i niniejsza instrukcja dostępne na stronie internetowej: <a href="https://mercatormedical.eu">https://mercatormedical.eu</a>

Wskazania dotyczące użytkowania	
Przed pobraniem rękawic z opakowania, zalecane jest dokładne osuszenie skóry rąk. Przed użyciem sprawdzić, czy rękawice nie zawierają defektów lub niedoskonałości oraz czy rękawice nie są uszkodzone. W trakcie użytkowania, w przypadku przekucia, pęknięcia lub rozdarcia należy natychmiast zmienić rękawice. Unikać rękawic zabrudzonych od wewnątrz – mogą one wywoływać podrażnienia prowadzące do zapalenia skóry lub poważniejszych obrażeń. Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, gdyż warunki w miejscu pracy mogą się różnić od warunków testu w zależności od temperatury, ścierania i degradacji. Rękawic nie należy używać w kontakcie z otwartym ogniem oraz do ochrony przed wszelkimi ostrymi narzędziami. Rękawice nie są przeznaczone do spawania, do ochrony przed porażeniem elektrycznym, promieniowaniem jonizującym, ani przed działaniem zimnych i gorących przedmiotów.	

Składniki/składniki niebezpieczne	
Komponenty użyte w produkcji rękawic mogą powodować reakcje alergiczne. Niektóre rękawice mogą zawierać składniki będące przyczyną wystąpienia alergii u osób na nie uczulonych, u których mogą powstawać kontaktowe podrażnienia i/lub reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej skonsultuj się z lekarzem.	

Utylizacja	
Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.	

Symbole użyte na opakowaniu							
	producent		data ważności		jakości produktu nie gwarantuje się w przypadku uszkodzenia opakowania		rękawice nitylowe
	kod partii		data produkcji		opakowanie do recyklingu		rękawice bezpudrowe
	numer katalogowy		chronić przed ozonem		opakowanie można traktować jako odpad komunalny		do jednorazowego użycia
	zgodność z wymaganiami rynku ukraińskiego		chronić przed wilgocią		rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością		produkt niejadalny
	numer modelu		chronić przed światłem słonecznym		limit temperatury 5°C - 35°C		zapoznaj się z IFU

## MERCATOR simple nitrile MODEL #0002

REF NO: RP30003001-05\_0002

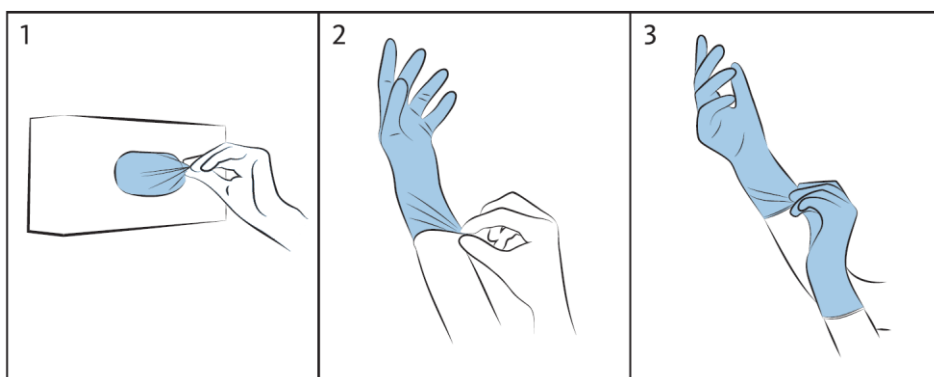
### ŚOI klasyfikacja i zgodność z normami

Rękawice zaklasyfikowane jako Środek Ochrony Indywidualnej – kategoria I, do minimalnego ryzyka zgodnie z Rozporządzeniem 2016/425.

Zgodność z normami: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-2:2019.



### Jak zakładać rękawice?



### Jak zdejmować rękawice?

